

Anleitung zur Gewinnung einer Speichelprobe (Greiner Bio-One Speichelsammelsystem)

Bitte stellen Sie vor der Entnahme sicher, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum des Greiner Bio-One Speichelsammelsystems nicht überschritten ist.




1

Die Mundhöhle 2 Minuten mit der gelben Extraktionslösung ① spülen. Den Sammelbecher ② aufschrauben und die Spüllösung in den Becher ausspucken.




2

Nach dem Verschließen des Bechers den Aufkleber von der Oberseite des Deckels entfernen und den Aufkleber aufbewahren.

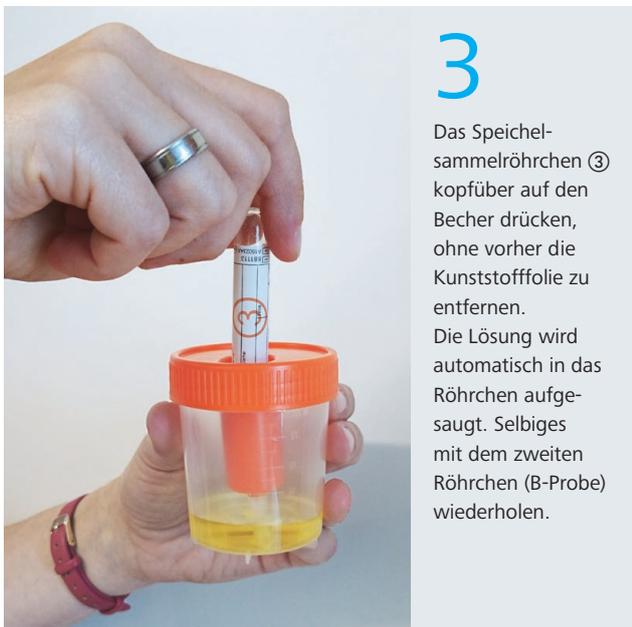

3

Das Speichelsammelröhrchen ③ kopfüber auf den Becher drücken, ohne vorher die Kunststoffolie zu entfernen. Die Lösung wird automatisch in das Röhrchen aufgesaugt. Selbiges mit dem zweiten Röhrchen (B-Probe) wiederholen.

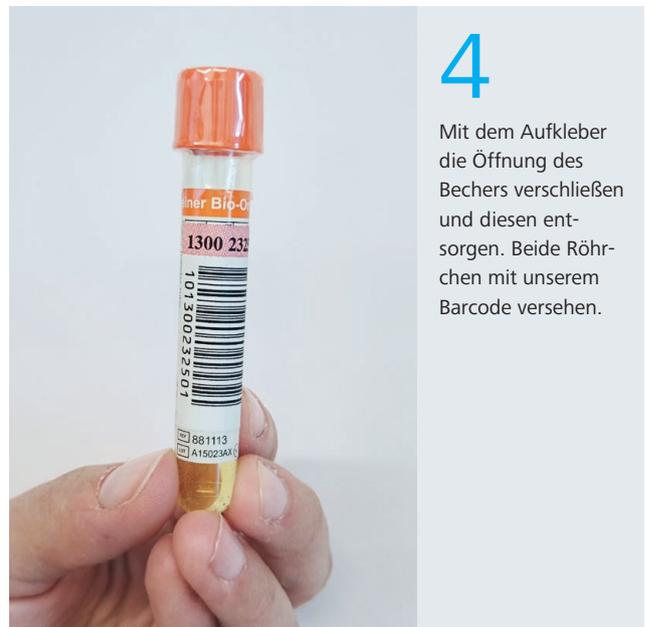

4

Mit dem Aufkleber die Öffnung des Bechers verschließen und diesen entsorgen. Beide Röhrchen mit unserem Barcode versehen.

Die Speichelsammelröhrchen in ein Transportröhrchen legen und zusammen mit dem ausgefüllten sowie mit unserem Barcode versehenen Anforderungsschein in eine Versandtasche geben.

Weitere Hinweise

Bei forensischer Fragestellung ist die Probenahme nach Identitätsprüfung unmittelbar vor der Probenahme und unter direkter Aufsicht durch die entnehmende Institution durchzuführen, um etwaige Manipulationen ausschließen zu können.

Die B-Probe wird nach Probeneingang im Probenarchiv 18 Monate tiefgekühlt aufbewahrt.